

Instrukcja używania

Bed Wedges (Popdpórki i kliny stabilizujące pozycję pacjenta)



Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem wyrobu!
UWAGA oznacza: nieprzestrzeganie tego zapisu instrukcji grozi uszkodzeniem wyrobu lub urazem ciała pacjenta, albo innych osób.

1. Dane techniczne i zawartość opakowania


Nr kat. wyrobu: PM-8010
Wymiary:
2 x kliny 25 x 22 x 13/0 cm
1 x klin 50 x 22 x 13/0 cm
Materiał: Foam RG 25
Pokrowiec: PU przeciw-poślizg.
Kolor: niebieski
ILN: 4250355380104
Przechowywanie: -5 – 40° C
Chroń przed słońcem

Zawartość dostawy:

- Bed Wedges
- Instrukcja

Wyprodukowano w Niemczech

Pokrowiec:

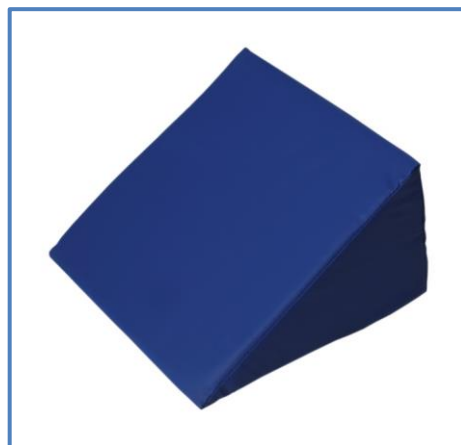

2. Użytkowanie / Układanie

Podpórki i kliny zostały zaprojektowane w celu wygodnego pozycjonowania pacjentów wymagających opieki pielęgniarstwa. Zapewniają pacjentowi wygodne oparcie i stabilizację, w zależności od specyficznych potrzeb terapeutycznych lub opiekuńczych. Kliny są szczególnie przydatne do układania ciała pacjenta na czas nocy oraz do ustabilizowania bezpiecznej pozycji siedzącej na łóżku.

Przykłady wykorzystania klinów i podpórek


1. Pozycjonowanie na biodrze w celu zmiany stroju lub do wykonania podstawowych czynności higieniczno-opiekuńczych i dla wymiany podkładów nieprzemakalnych (bezpieczna i stabilna pozycja do kąta 135°).



2. Pozycjonowanie do karmienia lub w celu zabezpieczenia pacjenta przed ześlizgnięciem się z pozycji siedzącej w łóżku.



3. Pozycjonowanie w celu utrzymania pozycji leżącej, na boku, jak również zmiana pozycji w celu zapobiegania odleżynom, szczególnie wygodne w połączeniu z innymi wyrobami do transferu firmy Petermann.

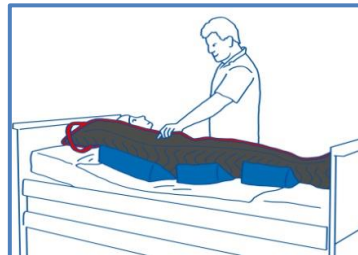

Podpórek i klinów można używać tylko po właściwym przeszkoleniu odpowiedzialnego personelu oraz po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją. Nawet jeśli pacjent został ułożony w optymalnej, możliwej pozycji, nadal powinien być regularnie kontrolowany i repositionowany z częstotliwością zależną od poziomu zagrożenia danego przypadku.

3. Konserwacja / Pielęgnacja

Wszystkie podpórki i kliny mogą być czyszczone z użyciem wilgotnej ściereczki. Używaj ciepłej wody i łagodnego detergentu myjącego. W razie konieczności przetrzyj wyrób i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Do czyszczenia nie używaj żadnych preparatów żrących lub wybielających, ani ostrych narzędzi.

W razie potrzeby sugerujemy dezynfekcję wcierną z użyciem preparatów takich, jak np.: Trionic® lub podobnych (więcej informacji na prośbę klienta).

4. Gwarancja

- Wytwórca gwarantuje, że wyrób jest wolny od wad materiałowych i błędów produkcyjnych.
- Okres ważności gwarancji wynosi **1 rok**. Gwarancja nie pokrywa żadnych usterek wynikających z niewłaściwego korzystania z wyrobu.
- Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek incydentalne lub przypadkowe urazy lub uszkodzenia mienia.

5. Kontrola funkcjonalna i wzrokowa / Bezpieczeństwo / Ponowne użycie

Wyroby do pozycjonowania ulegają naturalnemu zużyciu. Regularnie i uważnie kontroluj je na obecność oznak zużycia i prawidłowości działania, szczególnie przed ich ponownym wprowadzeniem do używania. Upewnij się, że wyrób jest w dobrym stanie technicznym, a materiał i szwy nie są uszkodzone. Najlepszym sposobem na dokonanie tych inspekcji jest porównanie używanego wyrobu z nowym.

Przed kolejnym użyciem wyrób musi zostać zdezynfekowany, patrz 3.

UWAGA!:

- **Uszkodzone wyroby nie mogą być dalej użytkowane.**
- **Jeśli mobilność pacjenta jest ograniczona ważnym jest, aby repozycjonowania dokonywać pod kontrolą zaufanej osoby asystującej.**
- **Pacjenci przewożeni na łózkach mogą być pozycjonowani wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub przez osoby, które przeszły odpowiedni instruktaż.**
- **Należy unikać preparatów dezynfekcyjnych z zawartością alkoholu. Preparaty kolorowe (np. jodyna) mogą powodować delikatne odbarwienia.**
- **Środki chemiczne, szczególnie te z zawartością chloru nigdy nie powinny być używane do czyszczenia! Powodują one twardnienie poliuretanu, który staje się kruchy i podatny na nasiąkanie wilgocią.**

6. Żywotność

Jeżeli wyrób jest użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem i przez jednego pacjenta, wówczas jego żywotność wynosi 3 lata. Ostatecznie jednak żywotność wyrobu zależy od różnych czynników i może się zmieniać zależnie od częstotliwości i intensywności używania, jak również od ilości prań czy dezynfekcji, jakimi wyrób przeszedł. Regularnie kontroluj stan i funkcjonalność wyrobu pamiętając o ostrzeżeniach zawartych w rozdziale 5.

7. Oznakowanie wyrobu

Wyroby do transferu pacjentów serii Petermann Alpha® są wyrobami medycznymi Klasy I i spełniają wymagania zasadnicze Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EWG.

Firma Petermann GmbH ma certyfikat systemu nadzoru jakości DIN EN ISO 13485 wystawiony przez instytut TÜV Süd.

8. Utylizacja

Nie ma specjalnych wymogów dot. utylizacji tego wyrobu medycznego do transferu chorych; Zużyte wyroby powinny zostać usunięte i zutylizowane w zgodzie z lokalnymi przepisami w tym zakresie.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dot. użytkowania naszych wyrobów skontaktuj się z nami:

Dystrybutor w Polsce:

Mobilex Sp. z o.o.
siedziba: ul. Radwańska 23/1, 90-540 Łódź
obsługa klienta i serwis: ul. Duńska 3/5, Łódź
tel. +48 42 214 29 11; fax +48 42 214 14 05
e-mail info@mobilex.pl ; www.mobilex.pl

Wytwórca:

Petermann GmbH • Ziegelhaus 12 • D-91601 Dombühl
Postal address: Petermann GmbH • Waldweg 3 • D-91601 Dombühl
Phone: +49 (0) 9868 9339-0 • Fax: +49 (0) 9868 9339-20
E-mail: petermann@pm-med.de • www.pm-med.de

„Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą podlegać zmianom bez uprzedzenia”